

**Produktinformationen**

---

**HeyTec-NC** ist ein nano-gefülltes lighthärtendes Microhybrid-Komposit für Anterior- und Posterior-Restaurationen.

**HeyTec-NC** basiert auf BIS-GMA-Harzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05-0,9 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 81 % (Gewichtsprozent) und 63 % (Volumenprozent).

**HeyTec-NC** erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 4049.

**1. INDIKATIONEN**

Geeignet für alle Kavitäten.

**2. NEBENWIRKUNGEN**

Bei direktem Kontakt mit der Pulpa sind Irritationen möglich. Deswegen muß zum Schutz der Pulpa bei tiefen Ausbohrungen der Kavitätäsboden immer mit einer dünnen Schicht Calciumhydroxid-Unterfüllungsmaterial bedeckt werden.

**3. INTERAKTIONEN**

Nicht in Verbindung mit Eugenol haltigen Präparaten verwenden, da Eugenol die Aushärtung des Composites beeinträchtigt. Auch die Lagerung in der Nähe von nicht verschlossenen Eugenol haltigen Produkten ist schädlich. Bringen Sie daher nicht ausgehärtetes Kompositmaterial nicht in Kontakt mit Eugenol haltigen Produkten.

**4. VORBEREITUNG DES ZAHNS UND FARBAUSWAHL**

Es wird empfohlen, den Zahn mit einer fluoridfreien Polierpaste (z.B. einer Bimssteinmehlaufschlammung) zu reinigen. Ermitteln Sie dann die Zahnfarbe am feuchten Zahn und wählen Sie die geeignete HeyTec-NC -Farbe aus.

HeyTec-NC ist in VITA<sup>®</sup>-Farben und auch in Sonder- und Bleachfarben erhältlich.

**5. VORBEREITUNG DER KAVITÄT**

Nach Trockenlegung (am besten mit Kofferdamm) erfolgt die Kavitäten Präparation so, dass möglichst wenig gesundes Zahnmaterial verloren geht.

Optimal sollten Pulpen nahe Bereiche photoaktiviert desinfiziert werden (PAD). Ist dieses nicht möglich, kann der untere Kavitätsbereich mit einer dünnen Schicht Calciumhydroxid-Unterfüllungsmaterial bedeckt werden.

Die anschließende Konditionierung und Applikation eines Haftvermittlers kann gemäß der Total-Etch-Technik mit ETCHING GEL (z.B. H-Etch) und anschließender Applikation eines lighthärtenden Haftvermittlers (z.B. H-BOND) oder mit einem selbstätzenden Haftvermittler (z.B. H-Etchbond) entsprechend der Gebrauchsanweisung des verwendeten Produktes erfolgen. Danach kann HeyTec-NC direkt verwendet werden.

**6. APPLIKATION UND AUSHÄRTUNG**

HeyTec-NC wird in der ausgewählten Farbe mit geeigneten Instrumenten appliziert. HeyTec-NC ist leicht modellierbar. Transparente Matrizen-Streifen können benutzt werden.

Für ein optimales Resultat sollte bei großen Kavitäten zuerst ein lighthärtender, fließfähiger Komposit (z.B. HeyTec-Flow) appliziert werden. Anschließend wird das HeyTec-NC appliziert. Bei kleinen Kavitäten kann HeyTec-NC direkt appliziert werden.

Für ein optimales Ergebnis soll HeyTec-NC in Schichten mit einer Schichtstärke von max. 2 mm appliziert werden. Dabei ist jede Schicht separat auszuhärten. Bei Verwendung einer Polymerisationslampe mit einer Lichtintensität von mindestens 1000 mW/cm<sup>2</sup> jede Schicht wie folgt aushärten:

- helle Farben (z.B. A1; A2) - 20 Sekunden
- dunkle Farben (z.B. A3.5) - 30 Sekunden

**7. FINIEREN/POLITUR**

Das Beschleifen kann mit feinen Polierdiamanten, -steinen oder -bürsten erfolgen. Auf Hochglanz kann mit Softglanz-Polierern oder mit Oral-Polierfilzen poliert werden.

**8. LAGERHINWEIS**

Nicht über 25°C(78°F) lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Spritzen sofort nach Gebrauch verschließen um Lichteinwirkung zu verhindern.

APPLIC.-Tips sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

*Für Kinder unzugänglich aufbewahren!*

**9. WEITERE INFORMATIONEN**

Das Kompositmaterial nicht mit Harzen verdünnen. Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden, besonders bei Personen, die bekannter weise allergische Reaktionen auf Methacrylate zeigen.

VITA<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen.

*Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!*

**10. VERPACKUNG UND REFERENZ**

1 Spritze <b>5g</b>	A1 - HE011 A2 - HE012 A3 - HE013 A3.5 - HE014	OA2 - HE015 OA3 - HE022 B2 - HE017
20 APPLIC.-Tips <b>0,3g</b>	A1 - HE011 A2 - HE012 A3 - HE013 A3.5 - HE014	OA2 - HE015 OA3 - HE022 B2 - HE017
Set 8 Spritzen <b>4g</b>	<b>Verschiedene Farben</b> -HE076	
Set 8 Spritzen <b>5g</b> + H-Bond <b>5ml</b>	<b>Verschiedene Farben</b> - HE077	
Set 8 Spritzen <b>5g</b> + H-Etchbond <b>5ml</b>	<b>Verschiedene Farben</b> - HE078	
Set 5 Spritzen <b>1g</b>	<b>A1, A2, A3, A3,5, OA2</b> - HE079	

©05/2016

Manufacturing

P.L. Superior Dental Materials GmbH  
22607 Hamburg  
Germany

Sales

Heydent GmbH  
86916 Kaufering  
Germany**Made in Germany!**

CE 0482