

Produktinformationen

HeyTec Semi ist ein dualhärtender semi-permanenter Befestigungszement. **HeyTec Semi** basiert auf multifunktionellen Methacrylaten und enthält Zinkoxid.

HeyTec Semi dient zur Befestigung von implantatgetragenen Kronen und Brücken. Das Material zeigt gute elastische Eigenschaften und dichtet auf Grund einer kontrollierten leichten Expansion gut ab.

Geliefert in 4:1 MINIMIX-Spritzen kann **HeyTec Semi** sehr einfach und komfortabel angewendet werden.

HeyTec Semi beeinflusst in keiner Weise die Aushärtung von später verwendeten Komposit-Zementen und Kompositen.

ANWENDUNG:

Vorbereiten der MINIMIX-Spritze:

Der Verschluss der MINIMIX-Spritze wird entfernt (**wegwerfen, nicht wiederverwenden!**) und durch eine 4:1-Mischkanüle ersetzt. Durch seitliches Verdrehen um 90° wird die Mischkanüle fixiert. Das Material kann direkt aus der Mischkanüle appliziert werden.

Anmerkung:

Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten Anwendung als Verschluss. Die ersten 2-3 mm des aus der Mischkanüle austretenden Materials sollten verworfen werden. Dies gilt für jede neue Anmischung.

Applikation:

Vor dem Befestigen, das Abutment und Restauration entfetten, reinigen (z.B. mit Alkohol) und trocken.

Das Applizieren in die Restauration erfolgt unter leichtem Druck direkt aus der Mischkanüle. Eine sehr kleine, für eine dünne Schicht ausreichende Menge gemischten Materials wird in die Innenseite der Restauration gegeben und diese nach spätestens **2 Minuten** (Verarbeitungszeit bei 23°C) vorsichtig mit leichtem, dann mit festem Druck auf das Implantat gesetzt.

Um eine schnelle Fixierung der Restauration zu erhalten kann **HeyTec Semi** an den Randbereichen für **20 Sekunden** je Fläche belichtet werden. Bei transluzenten Materialien, kann auch durch das Material hindurch belichtet werden (**40 Sekunden** je Fläche).

Ohne Licht härtet **HeyTec Semi** im Mund innerhalb von ca. **4 Minuten** aus.

Nach der Aushärtung kann der Überschuss entfernt werden.

Hinweise:

Wenn die Restauration zu Kontrollzwecken entfernt werden muss, lässt sich **HeyTec Semi** sehr leicht und meist in einem Stück entfernen. Sollten noch Reste am Abutment oder an der Restauration verbleiben, können diese durch Verblasen mit Wasser und Absaugen leicht entfernt werden.

Anschließend das Abutment und Restauration mit einem in Alkohol bzw. geeigneten Desinfektionsmittel getränkten Wattepellet reinigen und desinfizieren. Gründlich mit Wasser spülen und mit Luft trocknen.

Nun kann die Restauration erneut mit **HeyTec Semi** befestigt werden (siehe Applikation).

Warnhinweise:

- Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden, besonders bei Personen, die bekannter weise allergische Reaktionen auf Methacrylate zeigen.
- Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser waschen.
- Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.

Lagerhinweis:

Nicht über 20 °C lagern! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

8. VERPACKUNG UND REFERENZ

1 Spritze 5ml 5 mixing tips	Transparent - HE032
---------------------------------------	----------------------------

©05/2016

Manufacturing

Sales

Made in Germany!

P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607 Hamburg
Germany

Heydent GmbH
86916 Kaufering
Germany

CE 0482